


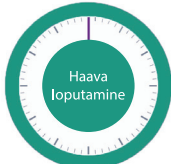

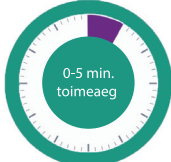

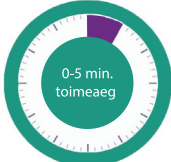


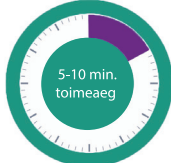

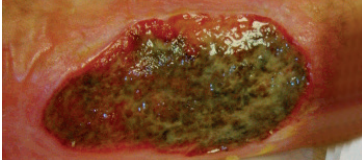
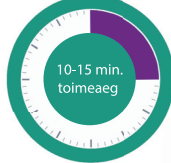

# Prontosan® puhastab haavad biofilmist

## AINULT PUHAS HAAV PARANEB

Enamiku haavade paranemist aeglustab haavas arenev silmale nähtamatu biofilm ehk biokile. Paljud haavaantiseptikumid võivad biofilmi koostises elavate mikroobide puhul toimetuks osutada. Ainulaadne biofilmi lõhustav vahend on Prontosan® lahus ja Prontosan® X geel. Lahuse ja geeli kombineeritud kasutamine aitab:

- eemaldada haavast biofilmi (Prontosan® lahus),
- vältida biofilmi taasteket (Prontosan® X geel).

### Prontosan® toodete kasutusviis ja -aeg sõltub konkreetsest haavast

HAAVA KIRJELDUS	EESMÄRK	KUIDAS KASUTADA?
<b>ÄGE OPERATSIIONIHAAV, ESMAS- VÕI TEISESPINGSALT PARANEV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riskigruppi kuuluv patsient.*)</li> <li>■ Haavakatt puudub.</li> <li>■ Minimaalne haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Kasutage lahust. 
<b>ÄGE TRAUMAHAAV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debris (kahjustatud kude haavas).</li> <li>■ Hematoom.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. 
<b>KROONILINE HAAVAND, GRANULEERUV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riskigruppi kuuluv patsient.*)</li> <li>■ Vähene haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kaaluge X geeli kandmist haavale.  + 
<b>KROONILINE HAAVAND</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kerge haavakatt.</li> <li>■ Vähene haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kandke haavale X geeli.  + 
<b>KROONILINE HAAVAND, KRIITILISELT KOLONISEERITUD / INFITSEERITUD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mõõdukas või suur haavaeritis.</li> <li>■ Haava paranemine on pidurdunud või seiskunud.</li> <li>■ Haavakatt.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kandke haavale X geeli.  + 

\*) Riskigruppi kuuluvaiks loetakse patsiendid, kellel on kaasuvad haigused nt diabeet, immuunpuudulikkus, samuti patsiendid, keda on ravitud kortikosteroididega või kel on eelnevalt esinenud haavainfektsiooni, biofilmi, haavakattu.

Prontosan® tooteid võib kasutada koos erinevate haavasidemetega.

Pärast avamist tuleb Prontosan® lahus ja Prontosan® X geel kasutada ära 8 nädala jooksul (kui toodet kasutatakse ainult ühel patsiendil).


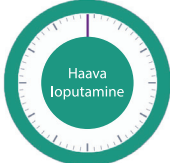

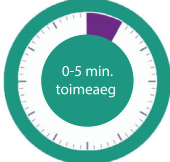




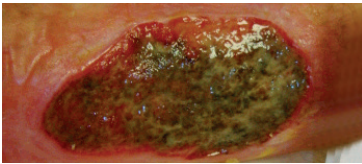

# Prontosan® puhastab haavad biofilmist

## AINULT PUHAS HAAV PARANEB

Enamiku haavade paranemist aeglustab haavas arenev silmale nähtamatu biofilm ehk biokile. Paljud haava-antiseptikumid võivad biofilmi koostises elavate mikroobide puhul toimetuks osutada. Ainulaadne biofilmi lõhustav vahend on Prontosan® lahus ja Prontosan® X geel. Lahuse ja geeli kombineeritud kasutamine aitab:

- eemaldada haavast biofilmi (Prontosan® lahus) ■ vältida biofilmi taasteket (Prontosan® X geel)

### Prontosan® toodete kasutusviis ja -aeg sõltub konkreetsest haavast

HAAVA KIRJELDUS	EESMÄRK	KUIDAS KASUTADA?
<b>ÄGE OPERATSIIONIHAAV, ESMAS- VÕI TEISESPINGSALT PARANEV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riskigruppi kuuluv patsient.*)</li> <li>■ Haavakatt puudub.</li> <li>■ Minimaalne haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Kasutage lahust. 
<b>ÄGE TRAUMAHAAV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debris (kahjustatud kude haavas).</li> <li>■ Hematoom.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. 
<b>KROONILINE HAAVAND, GRANULEERUV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riskigruppi kuuluv patsient.*)</li> <li>■ Vähene haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kaaluge X geeli kandmist haavale. 
<b>KROONILINE HAAVAND</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kerge haavakatt.</li> <li>■ Vähene haavaeritis.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kandke haavale X geeli. 
<b>KROONILINE HAAVAND, KRIITILISELT KOLONISEERITUD / INFITSEERITUD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mõõdukas või suur haavaeritis.</li> <li>■ Haava paranemine on pidurdunud või seiskunud.</li> <li>■ Haavakatt.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhastab haava.</li> <li>■ Vältib biofilmi / tüsistuste teket.</li> </ul>	Katke haav lahuses immutatud tamponiga. Kandke haavale X geeli. 

\*) Riskigruppi kuuluvaiks loetakse patsiendid, kellel on kaasuvad haigused nt diabeet, immuunpuudulikkus, samuti patsiendid, keda on ravitud kortikosteroididega või kel on eelnevalt esinenud haavainfektsiooni, biofilmi, haavakattu.

Prontosan® tooteid võib kasutada koos erinevate haavasidemetega.

Pärast avamist tuleb Prontosan® lahus ja Prontosan® X geel kasutada ära 8 nädala jooksul (kui toodet kasutatakse ainult ühel patsiendil).