

## Prontosan® lahus, spreij ja haavageelid sobivad kasutamiseks veterinaarpraksises



**Prontosan®** tooteid kasutatakse nahal, limaskestadel ja haavadel nii suurloomadel kui väikloomadel.

Vesilahus ja vesialuseline geel sisaldavad polüheksaniidi ja undetsüleenamidopropüülbetaini.

### **Prontosan®** lahus ja haavageel

- hoiavad ära haavapõletiku tekke,
- eemaldavad haavakatu ja biofilmi,
- kiirendavad haava paranemist,
- kõrvaldavad haavalõhna,
- väldivad armistumist,
- ei kipita, ei ärrita, ei määri,
- ei põhjusta valu,
- säilitavad toime kokkupuutel vere ja koevalkudega,
- tagavad paranemiseks vajaliku niiskustaseme,
- aitavad sidemeid valutult ja traumavabalt eemaldada.



Näiteid **Prontosan**<sup>®</sup> spreid ja geeli kasutamisest loomadel

### Haavasprei 75 ml



- Kõikide haavade loputamine, puhastamine ja niisutamine.
- Naha puhastamine: ekseemid, limaskestast põletikulised kahjustused, koerte „hot spot“ ehk kuum laik.
- Putukahammustustest tingitud nahaturse (kuplade) leevendamine.

### Haavageel 30 ml & haavageel X 50 g ja 250 g



- Kõik traumahaavad, eriti õhukese nahaaluse sidekoega kehapiirkondades (jalgadel, näol).
- Aeglustunud paranemisega (kroonilised) haavad ja haavandid.
- Õmblustega suletud haavad ja operatsioonihaavad pärast õmbluste asetamist.
- Kannuse- ja suulisevigastused (katkised suunurgad), sadula või sadulavöö tekitatud hõõrdumised.
- Prei (sõrgatsi- ja piirde naha ning nahaaluse koe põletik) paikne ravi.
- Sobib kasutamiseks ka metitsilliiniresistentsest stafülokokist (MRSA) tingitud seisundite korral.

Soovitame hoida Prontosan<sup>®</sup> haavaspreid ja haavageeli alati käepärast esmaabikotis.

**NBI!** Kui märkad haavas põletiku tunnuseid, nagu valu, punetus, turse või haavaümbruse naha kuumenemine, pea nõu loomaarstiga!

Turustaja:

**B. Braun Medical OÜ**

Pilvetee tn 8, Tallinn 12618

Tellimine 6771 200

[www.bbraun.ee](http://www.bbraun.ee)

[www.prontosan.ee](http://www.prontosan.ee)

