

Prontosan® Debridement Pad

Haavakatu ja rakurusude (*debris*) õrn mehaaniline eemaldamine haavast



- Prontosan® Debridement Pad on täiendav abivahend haavapõhja puhastamisel Prontosan® haavaloputuslahusega.
- Padjake koosneb kahest 3 mm paksusest kihist: haavapoolsest mikrokiudkihist, mis puhastab haavapõhja ja imavast pealiskihist, mille kombinatsioon tagab kiire, tõhusa ja ohutu haavapõhja puhastuse.
- Prontosan® Debridement Pad vabastab haava haavakatust ja rakurusudest (*debris*) ning seob endaga haavaeritist ja -kattu, säästes samal ajal tervet kudet.
- Prontosan® Debridement Pad tagab hea tulemuse katu ja nekroosiga haavadel, mida on eelnevalt autolüütiliselt puhastatud.
- Prontosan® Debridement Pad on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Kuidas mikrokiud töötavad?

- Mikrokiud on võimelised endaga siduma üliväikesi lausa mikroskoopilisi osakesi, selliseid, mida näiteks tavalised monokiud üksnes rohmakalt maha pühivad.
- Kui tõmbe- ja tõukejõud oleksid silmaga nähtavad, siis oleks näha, et mikrokiudude ja osakeste vahel tekib tõmbejõud.
- Padjake sisaldab miljoneid mikrokiude, mis parandab muljetavaldavalt rakurusude kinnitumist padjakese külge.
- Seetõttu aitavad mikrokiudlapid rakurususid (*debris*), haavaeritist ja haavakattu haavapõhjalt otsekui tolmuimeja abil eemaldada.

Haavapõhja puhastus Prontosan® DP haavapuhastuspadjakesega

- Padjakese märgistamata külg tuleb niisutada 15-20 ml Prontosan® haavaloputuslahusega*. Haiglasistes suuniste olemasolul tuleb järgida neid.
- Puhastage haav ja haavaümbruse nahk ringjate liigutustega padjakese niisutatud poolega, avaldades neile kerget survet.
- Pärast haavapõhja puhastamist on soovitatav loputada haav põhjalikult teistkordselt Prontosan® haavaloputuslahusega ja jätkata seejärel tavapärase raviga.

*Kui Prontosan® haavaloputuslahust pole, võib padjakest niisutada füsioloogilise naatriumkloriidi lahusega.

Padjakese materjal

Padjakese haavapoolne kiht koosneb polüestrist ja polüpropüleenist mikrokiududest ja väliskiht polüpropüleenist.

Omadused

- Suurepärased haavapõhja puhastusomadused tänu mikrokiudtehnoloogiale.
- Haavapõhja puhastus toimub õrnalt ilma kudesid ärritamata.
- Spetsiaalne tilgakujuline padjake aitab hästi puhastada nii sügavaid haavu kui ka raskesti ligipääsetavaid piirkondi.
- Blisterpakend võimaldab padjakest enne kasutamist turvaliselt ja aseptiliselt niisutada.

Pakendid

3908456 3 tk pakis

3908457 10 tk pakis

Tootja: B. Braun Medical AG Seesatz 17 CH-6204 Sempach Switzerland.

Turustaja: B. Braun Medical OÜ, Piltvetee tn 8, 12618 Tallinn. Tel: 677 12 00 e-mail: info@bbraun.ee, www.bbraun.ee